



Linha Monobloco

Manual de Funcionamento, Garantia e Manutenção

EXO





Rodas Traseiras Removíveis

Posicione-se ao lado da cadeira, segure a roda próxima ao centro, aperte o botão do eixo e puxe o conjunto. Para colocar faça a operação inversa.

Encosto

Pressione a cordinha para baixo até destravar em seguida empurre o encosto para frente.



Altura do Encosto

O encosto possui ajuste de altura, remova a capa do encosto, remova os parafusos de fixação, posicione o canote interno na posição desejada, coloque o parafuso novamente e em seguida a capa do encosto.

Ângulo do Encosto

Remova o parafuso lateral de ambos os lados, posicione no ângulo de melhor conforto, recoloque o parafuso.



Paralamas Laterais

Regule a altura desejada reposicionando o parafuso de "stop" na altura mais conveniente.

Freios

Afrouxe os parafusos da abraçadeira, posicione o freio no ponto de frenagem desejado.



Pedal

Afrouxe os parafusos que ficam atrás do tubo, mova o pedal para a altura desejada, em seguida aperte novamente.



Plataforma dos Pés

Afrouxe os parafusos, movimente até o ponto de inclinação ideal, em seguida aperte bem.

Roda Dianteira

Para lubrificar e remover fios de cabelos que enrolam entre o garfo e os rolamentos, remova os parafusos laterais que prendem a roda no garfo, limpe e remova toda a sujeira em seguida reponha o conjunto.



Centro de Gravidade Ajustável

Afrouxe os parafusos da torre de fixação de ambos os lados, mova a régua de posicionamento para o ponto desejado, aperte novamente.

Após a mudança os freios e os paralamas devem ser reposicionados.

Distância da Roda Traseira em Relação a Cadeira

Afrouxe os parafusos da abraçadeira de fixação, remova o eixo de uma das rodas, insira dentro da bucha receptora puxe para fora até a distância desejada, em seguida aperte bem os parafusos.



Removendo o Garfo

Para dar manutenção e ajuste no garfo das rodas dianteiras proceda com afrouxamento do parafuso sextavado na parte superior, em seguida remova o garfo.

Dicas de Manutenção Periódica

- ✓ Calibragem dos Pneus
Quinzenal - (90 lbs para pneus tubulares - 60 lbs para pneus convencionais).
- ✓ Lubrificação dos Eixos Removíveis das Rodas Traseiras
Mensal - Uma vez ao mês borrifar óleo spray nos eixos em seguida remover o excesso.
- ✓ Limpeza de Fios e Cabelos das Rodinhas Dianteiras
Trimestral - Uma vez a cada três meses.
- ✓ Ajuste nos Freios
Trimestral - Uma vez a cada três meses.
- ✓ Troca da Tapeçaria
Anual - Uma vez ao ano.
- ✓ Troca dos Pneus Traseiros
Anual - Uma vez ao ano.
- ✓ Troca das Rodinhas Dianteiras
Anual - Uma vez ao ano.
- ✓ Rolamentos das Rodas Traseiras
Anual - Uma vez ao ano.

Garantia:

* 2 anos para Estrutura (*quebra ou ruptura).
6 meses para Defeito de Fabricação de Partes e Peças Técnicas

Data de aquisição: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Exclusão:

- Pneus e Câmaras de Ar;
- Riscos de Pintura pós uso;
- Tapeçaria por danos devido a sobre peso ou incontinência urinária;
- Mal uso do equipamento.

Nº de série: _____

Rev. 000



 Fabricado no Brasil

(62) 3288-5741 | www.smartcr.com.br
atendimento@smartcr.com.br
Av. Center, Nº 1.321, Qd. 02 Lt. 09 - Res. Center Ville
Goiânia-GO - CEP: 74.369-003