



Linha Monobloco

# Manual de Funcionamento, Garantia e Manutenção

ORION





## Rodas Traseiras Removíveis

Posicione-se ao lado da cadeira, segure a roda próxima ao centro, aperte o botão do eixo e puxe o conjunto. Para colocar faça a operação inversa.

## Encosto

Puxe o encosto para trás até disparar o travamento; para destravar levante a barra de travamento para cima e empurre o encosto pra frente.



## Altura do Encosto

O encosto possui ajuste de altura, remova a capa do encosto, remova os parafusos de fixação, posicione o canote interno na posição desejada, coloque o parafuso novamente e em seguida a capa do encosto.

## Ângulo do Encosto

Remova o parafuso lateral de ambos os lados, posicione no ângulo de melhor conforto, recoloque o parafuso.



## Paralamas Laterais

Regule a altura desejada reposicionando o parafuso de "stop" na altura mais conveniente.

## Freios

Afrouxe os parafusos da abraçadeira, posicione o freio no ponto de frenagem desejado.



## Pedal

Afrouxe os parafusos que ficam atrás do tubo, mova o pedal para a altura desejada, em seguida aperte novamente.



## Plataforma dos Pés

Afrouxe os parafusos, movimente até o ponto de inclinação ideal, em seguida aperte bem.

## Assento e Encosto

Ambos possuem regulagem de tensão, no assento afrouxe os parafusos do lado esquerdo, solte o velcro de regulagem em seguida tracione a tapeçaria até ficar bem esticada, cole o velcro e reaperte os parafusos.

No encosto, levante a saia na parte traseira e tencione as faixas tensoras reajustando os velcros.



## Centro de Gravidade Ajustável

Afrouxe os parafusos da torre de fixação de ambos os lados, mova a régua de posicionamento para o ponto desejado, aperte novamente.

Após a mudança os freios e os paralamas devem ser reposicionados.

## Distância da Roda Traseira em Relação a Cadeira

Afrouxe os parafusos da abraçadeira de fixação, remova o eixo de uma das rodas, insira dentro da bucha receptora puxe para fora até a distância desejada, em seguida aperte bem os parafusos.



## Removendo o Garfo

Para dar manutenção e ajuste no garfo das rodas dianteiras proceda com afrouxamento do parafuso sextavado na parte superior, em seguida remova o garfo.

## Roda Dianteira

Para lubrificar e remover fios de cabelos que enrolam entre o garfo e os rolamentos, remova os parafusos laterais que prendem a roda no garfo, limpe e remova toda a sujeira em seguida reponha o conjunto.



\*Tolerância de Peso: 100 Kg

## Dicas de Manutenção Periódica

- ✓ Calibragem dos Pneus  
Quinzenal - (90 lbs para pneus tubulares - 60 lbs para pneus convencionais).
- ✓ Lubrificação dos Eixos Removíveis das Rodas Traseiras  
Mensal - Uma vez ao mês borrifar óleo spray nos eixos em seguida remover o excesso.
- ✓ Limpeza de Fios e Cabelos das Rodinhas Dianteiras  
Trimestral - Uma vez a cada três meses.
- ✓ Ajuste nos Freios  
Trimestral - Uma vez a cada três meses.
- ✓ Troca da Tapeçaria  
Anual - Uma vez ao ano.
- ✓ Troca dos Pneus Traseiros  
Anual - Uma vez ao ano.
- ✓ Troca das Rodinhas Dianteiras  
Anual - Uma vez ao ano.
- ✓ Rolamentos das Rodas Traseiras  
Anual - Uma vez ao ano.

### Garantia:

\* 2 anos para Estrutura (\*quebra ou ruptura).  
6 meses para Defeito de Fabricação de Partes e Peças Técnicas

Data de aquisição: \_\_\_\_\_

Nº da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

### Exclusão:

- Pneus e Câmaras de Ar;
- Riscos de Pintura pós uso;
- Tapeçaria por danos devido a sobre peso ou incontinência urinária;
- Mal uso do equipamento.

Nº de série: \_\_\_\_\_

Rev. 000



 Fabricado no Brasil

(62) 3288-5741 | [www.smartcr.com.br](http://www.smartcr.com.br)  
[atendimento@smartcr.com.br](mailto:atendimento@smartcr.com.br)  
Av. Center, Nº 1.321, Qd. 02 Lt. 09 - Res. Center Ville  
Goiânia-GO - CEP: 74.369-003